

# Medical Products Research

Medical devices for hospital and home since 2005



inspiration  
in respiratory  
therapy

## SNORE-LESS

Il cuscino SNORE-LESS consente di dormire comodamente sul fianco impedendo di assumere la posizione supina.



OSAS  
RONCOPATIA  
APNEE CENTRALI  
BITE ORTODONTICO  
ULCERE DA PRESSIONE

Il cilindro addominale, oltre alla funzione di comfort, favorisce il mantenimento della postura impedendo al cuscino di arretrare



## RONCOPATIA SEMPLICE

Dormire su un fianco è considerato dagli esperti uno dei rimedi naturali per limitare il numero di episodi di russamento dovuti alla posizione supina.

## OSAS

Assumere una postura laterale può essere consigliabile in pazienti con OSAS di minor gravità, soprattutto se gli esami strumentali indicano come posizionale il russamento e le apnee. L'impiego di SNORE-LESS può essere utile anche come complemento della ventilazione con CPAP. In alcuni soggetti il beneficio della terapia posizionale consente di contenere le pressioni erogate dalla CPAP.

## APNEE CENTRALI e "Respiro Cheyne Stokes"

Nello scompenso cardiaco cronico la dispnea si aggrava in posizione supina, poter mantenere il corpo in decubito laterale è di sicuro aiuto per chi soffre di apnee centrali.

## BITE ORTODONTICO

Durante il sonno ai portatori di apparecchi di avanzamento mandibolare è, talvolta, suggerito di coricarsi sul fianco. SNORE-LESS, impedendo la posizione supina, è un ausilio indispensabile per aumentare l'efficacia del bite.

L'imbottitura, realizzata in schiuma di poliuretano, è stata pensata per essere in grado di stabilizzare il corpo in maniera confortevole sul fianco. Può essere utilizzato sia per coricarsi sul fianco destro che su quello sinistro. Per il rivestimento abbiamo scelto un tessuto tecnico (Amicor™)\*\* in grado di prevenire le sintomatologie dovute agli allergeni. Il tessuto presenta, inoltre, caratteristiche di elevata traspirabilità. È possibile richiedere un rivestimento idoneo all'uso ospedaliero in Poliestere/Poliuretano, impermeabile ai liquidi, traspirante al vapore acqueo ed ignifugo.


Disponibile in tre taglie.

Tabella per la scelta del cuscino.

Scegliere l'altezza (in cm.) sulla colonna a sinistra e il peso (in Kg) sulla riga superiore. L'intersezione fornirà la taglia consigliata\*.

cm\Kg	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
140	S	S	S	M	M	M	-	-	-	-
150	S	S	M	M	M	M	-	-	-	-
160	S	M	M	M	M	L	L	L	L	L
170	M	M	M	M	M	M/L	L	L	L	L
180	M	M	M	M	M	M/L	L	L	L	L
190	M	M	M	M	M	M/L	L	L	L	L
200	M	M	M	M	M/L	L	L	L	L	L

Distanza regolabile per adattarsi alle diverse circonferenze addominali

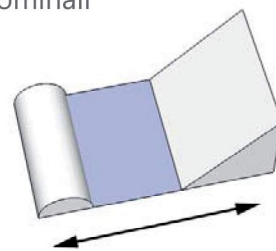

S 10-35 cm  
M 10-35 cm  
L 13-58 cm



\*Le misure sono indicative e danno solo un'idea del cuscino da utilizzare. E' sempre consigliabile verificare l'esatta corrispondenza in base alle proprie esigenze.

\*\* Amicor™ è un marchio registrato di ACORDIS UK Ltd

### Informazioni per l'ordine

Descrizione	Codice	
SNORE-LESS LARGE	MPR176	Cover Amicor™**
SNORE-LESS MEDIUM	MPR177	
SNORE-LESS SMALL	MPR178	
SNORE-LESS LARGE B	MPR179	Hospital Cover
SNORE-LESS MEDIUM B	MPR180	
SNORE-LESS SMALL B	MPR181	