

medical **products** research



INSPIRATION IN RESPIRATORY THERAPY



FLOW KLEANER

Broncoaspiratore per pazienti adulti e pediatrici, associato a tecnologia EFA® per una clearance efficace delle vie aeree

FLOW KLEANER


ASPIRATORE ELETTRONICO DI SECREZIONI

Il sistema di aspirazione elettronico implementato consente una sicura ed efficace clearance dell'albero bronchiale.



INNOVAZIONE

Regolazione digitale del livello di vuoto

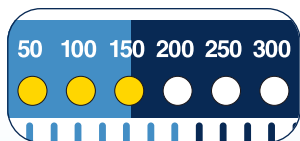

FEEDBACK

Livello di vuoto raggiunto visibile tramite LED

CONTROLLO

Sensore elettronico per rilevazione di vuoto




VERSATILITÀ

Indicazione all'uso pediatrico e adulto

EFA® PER UNA CLEARANCE PROFONDA NON INVASIVA

La tecnologia EFA® (Expiratory Flow Accelerator) integrata favorisce la disostruzione bronchiale mediante la sola accelerazione del flusso espiratorio. Le secrezioni polmonari subiscono l'effetto di taglio generato dall'accelerazione di flusso e vengono drenate dai distretti più profondi verso le alte vie aeree.

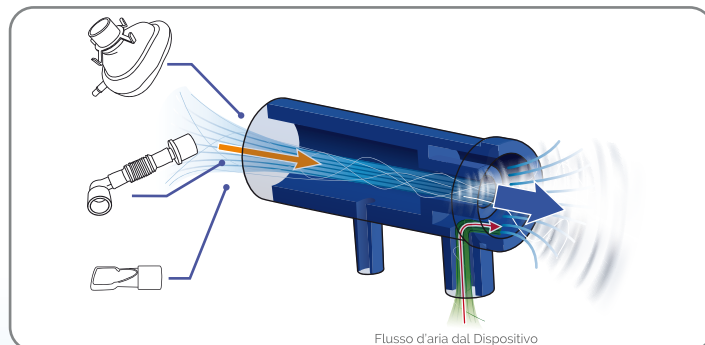

SICURA

Nessuna pressione applicata

FACILE


Nessuna collaborazione richiesta

CONFORTEVOLE




Nessuna sensazione sgradevole durante l'utilizzo

Le due funzioni integrate garantiscono una clearance ottimale per tutto l'albero bronchiale.

È stato dimostrato che in pazienti portatori di cannula tracheostomica, l'utilizzo della tecnologia EFA® riduce considerevolmente la necessità di intervenire con aspirazioni profonde, spesso fastidiose e talvolta dannose per i pazienti*.

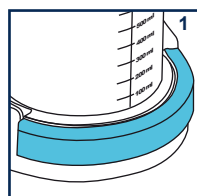

1 Sistema di bloccaggio per vaso di raccolta
2 Collegamento che assicura il vuoto

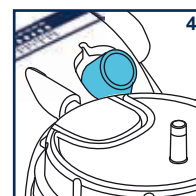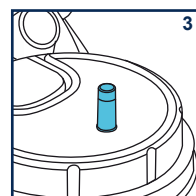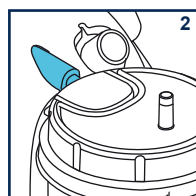

3 Connessione al circuito di aspirazione
4 Ingresso circuito EFA®

BATTERIA INTEGRATA

DESIGN COMPATTO E MANEGGEVOLE

PRATICA MANIGLIA DA TRASPORTO A SCOMPARSA

Dati tecnici

Aspirazione:

Flusso d'aria (alto flusso): 30L/min
Livelli di vuoto (alto vuoto): -50 + 635 mmHg
Autonomia batteria: 40min @ -300mmHg
Capacità vaso di raccolta: 650ml

EFA®:

Tempo terapia: 30min

Alimentazione:

Batteria: 100-240V AC - 50-60Hz;
Assorbimento: NIMH (12V - 2200mAh)
Classe di protezione elettrica: 120W
Tipo di parte applicata: II
Grado di protezione IP: BF
Dimensione e peso: IP21
32 x 31,5 x 18 cm - 2,6 Kg

Medical Products Research Srl dichiara che FLOW KLEANER è conforme alla Direttiva DM 93/42/CEE, classe IIa.

La sicurezza del dispositivo è stata verificata secondo gli standard internazionali previsti.

CE 1936

*Belli et al., A pilot study on the non-invasive management of tracheobronchial secretions in tracheostomised patients, Clinical Respiratory Journal 2019

Le informazioni riportate sono aggiornate al momento della stampa e possono variare in base alla nostra politica di costante miglioramento ©MPR Srl
Materiale riservato a medici ed operatori sanitari

Medical Products Research S.r.l.

Via Novara, 68 - 20025 Legnano (MI)

Tel +39 0331 597 992 - Fax +39 0331 485 089

info@mpr-italy.it - www.mpr-italy.it

